

Katheter-Sets



PEG-Set, steril

ArtNr: 22399006.
PZN: 01753078
Umkarton: 200 Packungen

Beschreibung:

- 3 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- 2 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach, mit Schlitz
- 1 Klebevlies 12 x 15 cm
- steril
- 1 Gebrauchsanleitung

Gebrauchsinformation:

- saubere Arbeitsfläche schaffen
- Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen
- alten Verband entfernen, die Fixierung der Halteplatte öffnen und leicht zurückziehen
- Handschuhwechsel
- Haut mit erster Vlieskomresse (ohne Schlitz) desinfizierend reinigen
- mit zweiter Vlieskomresse (ohne Schlitz) die Halteplatte und die Sonde desinfizierend reinigen
- Desinfektionsbereich trocknen lassen
- Schlitzkomresse zwischen Haut und Halteplatte um die Sonde legen
- mit der dritten Vlieskomresse (ohne Schlitz) die Halteplatte abdecken
- mit Fixierpflaster befestigen